



Gamme de coussins et accessoires de positionnement, en microbilles de polystyrène de faible granulométrie



Caractéristiques techniques

Enveloppe	Tissu bi-élastique polyamide (47%) enduit de polyuréthane (53%) Traitement antibactérien dans la masse de l'enduction
Garnissage	100% polystyrène
Entretien	Épongeage avec détergents habituels Ne pas stériliser en autoclave Ne pas chlorer Pas de nettoyage à sec Séchage en machine basse température



Protection

Des housses en polyuréthane bi-élastique ou en coton sont disponibles pour chaque modèle de coussin, excepté la talonnière.

Un entretien aisé

Patient sans risque infectieux.
Nettoyage quotidien :
Lors du changement des draps, il suffit de nettoyer la surface des coussins CAREWAVE, avec un ammonium quaternaire ou LE SURFACE HAUTE du laboratoire ANIOS.



Au changement de patient :
Nettoyer les coussins CAREWAVE avec une lotion décontaminante non chlorée et respecter le temps de contact.

Patient à risque infectieux.
Nettoyage quotidien :
Lors du changement des draps, il suffit de nettoyer la housse avec une lotion décontaminante avant de remettre un drap propre.

Au changement de patient :
Nettoyer les coussins CAREWAVE avec une lotion décontaminante non chlorée et respecter le temps de contact.

Distribué par

Nos références


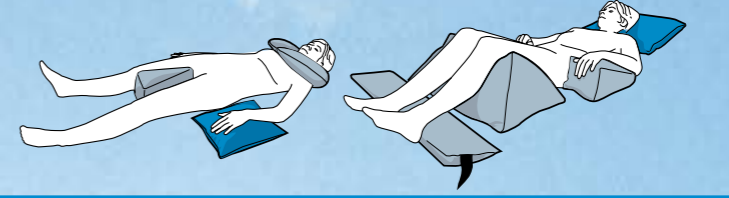

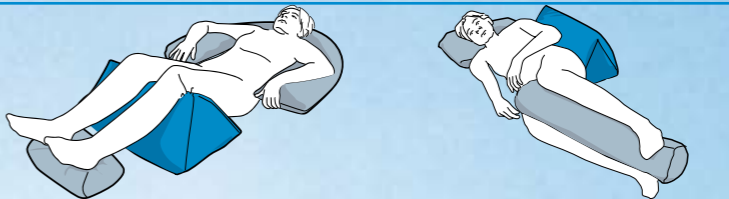



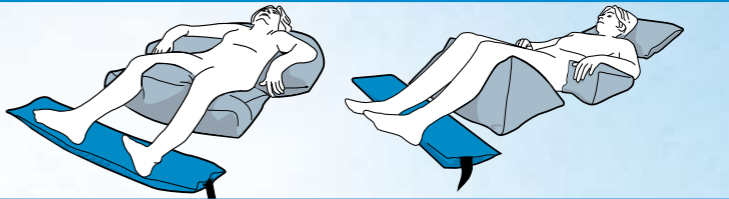





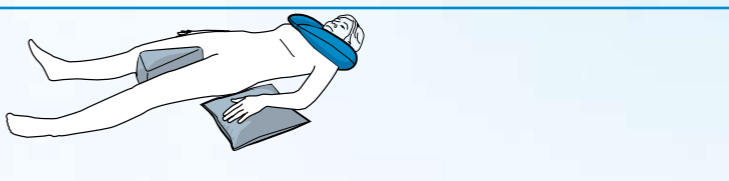






PRODUITS	Réf.	Dim.	Protection supplémentaire	
			Réf. Polyuréthane	Réf. en coton bouclette
Universel	NEG 0381	60x40	NEG 0401	NEG 0406
	NEG 0434	40x30		
Triangulaire	NEG 0497		NEG 0504	NEG 0505
Demi-lune	NEG 0382	180x33	NEG 0402	NEG 0407
Décharge talonnière	NEG 0552	90x15		
Décubitus	NEG 0383	170x33	NEG 0403	NEG 0408
Semi-Fowler	NEG 0498		NEG 0506	NEG 0507
Bouée	NEG 0384	20x130	NEG 0404	NEG 0409
	NEG 0385	17x70	NEG 0405	NEG 0410
Cylindrique	NEG 0435	17x30		
Coussin d'abduction	NEG 0532	15x30x20		
Talonnière	NEG 0386			

Les règles du positionnement

- Pour un décubitus dorsal :
 - relever le buste et les jambes en donnant au sommier un angle de 30°.
- Pour un décubitus latéral droit ou gauche :
 - Le patient est positionné de telle manière que son corps forme un angle de 30° avec le matelas et bénéficie d'un soutien dorsal à l'aide d'un coussin présentant un angle de 30° ajustable.
 - Il importe que le périnée ne soit pas en contact avec le matelas.
 - Les jambes sont fléchies au minimum au niveau des hanches et des genoux.
 - La jambe supérieure est posée à l'arrière de l'autre jambe avec une flexion de 30° au niveau de la hanche et de 35° au niveau du genou.



Carpenter SAS
Z.I Route de Tours - B.P.8
49490 Noyant
Tél. (33) 02 41 84 11 62 - Fax : (33) 02 41 84 11 63
E-mail : preventix@carpenter.com

PRODUIT	DESCRIPTION	APPLICATION	PRESCRIPTION
	NEG0381 : Coussin UNIVERSEL Utilisé localement, il limite les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protège les malléoles, ou permet de créer une décharge talonnière, ou aide au calage du patient, en position de décubitus latéral. Il peut également être utilisé comme oreiller. Coussin également disponible en petit format.		Libellé d'ordonnance : Base du coussin de série de positionnement, modulaire. Code LPP : 1269224
	NEG0497 : Coussin TRIANGULAIRE Ce coussin s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il maintient et cale confortablement le patient au niveau de l'abdomen lors du positionnement en décubitus semi latéral. Ce coussin peut également être utilisé en position SEMI FOWLER (inclinaison du dossier à 30° et inclinaison du bassin à 30°), en le plaçant sous les cuisses.		Libellé d'ordonnance : Base du coussin de série de positionnement, modulaire Code LPP : 1269224
	NEG0382 : Coussin DEMI LUNE Il maintient et cale confortablement le dos du patient lors d'un positionnement en décubitus latéral, et en position assise lors de l'utilisation du relèvement buste. Utiliser au fauteuil, il calera confortablement vos patients en toute sécurité.		Libellé d'ordonnance : Base du coussin de série de positionnement, modulaire Code LPP : 1269224
	NEG0552 : Coussin de DECHARGE TALONNIERE Ce coussin se fixe sur le matelas, au niveau des talons, à l'aide d'une sangle réglable. Il permet de stabiliser les chevilles et d'obtenir une décharge talonnière.		Libellé d'ordonnance : Base du coussin de série de positionnement, modulaire Code LPP : 1269224
	NEG0383 : Coussin de DECUBITUS LATERAL Ce coussin s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il maintient et cale confortablement le patient au niveau des épaules, du dos, des hanches et des genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. Il limite les phénomènes de friction.		Libellé d'ordonnance : Coussin de série de positionnement, standard Code LPP : 1220471
	NEG0498 : Coussin SEMI FOWLER Ce coussin s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il maintient et cale confortablement le patient en position SEMI FOWLER (inclinaison du dossier à 30° et inclinaison du bassin à 30°). Placer ce coussin sous les cuisses, le plot d'abduction vers l'avant entre les genoux. Pour un confort supplémentaire, il est recommandé d'utiliser le coussin cylindrique au niveau des talons.		Libellé d'ordonnance : Coussin de série de positionnement, standard Code LPP : 1220471
	NEG0384 : Coussin BOUÉE Il maintient et cale confortablement la tête du patient lors du positionnement en décubitus latéral. Il peut également être utilisé pour une position en assise.		Libellé d'ordonnance : Le plot de positionnement Code LPP : 1254895
	NEG0385 : Coussin CYLINDRIQUE Il maintient et cale confortablement le patient au niveau de l'abdomen lors du positionnement en décubitus latéral. Il peut s'utiliser entre les jambes, sous les talons et sous les chevilles pour faire de la décharge talonnière. Coussin également disponible en petit format.		Libellé d'ordonnance : Le plot de positionnement Code LPP : 1254895
	NEG0532 : Coussin D'ABDUCTION Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambes.		Libellé d'ordonnance : Le plot de positionnement Code LPP : 1254895
	NEG0386 : TALONNIERE Destinée à protéger les talons pour la prévention des escarres. Elle permet d'avoir une parfaite mobilité et un confort pour le patient. Elle aidera également aux soins.		Libellé d'ordonnance : Accessoire d'aide à la prévention des escarres Code LPP : 1221855